

大安聯合醫事檢驗所公告

公告編碼：475

日期：2026年05月12日

公告事項： 1. 檢驗項目Total Bilirubin參考區間
2. 檢驗項目Potassium檢體採集注意事項

1. 115年05月15日起，因文件審查，檢驗項目Total Bilirubin參考區間變更，詳細內容如下：

檢驗項目：Total Bilirubin 膽紅素總量

健保編號：09029C

檢體採集：血清、血漿(Lithium Heparin) 0.3mL(或全血1.5mL)，須空腹8~10小時，保存方式：4°C保存5天或-70°C保存3個月。血清或血漿檢體應避免溶血。膽紅素對光線十分敏感，應該將檢體避光處理。檢體須避光不建議原管複驗。

參考區間：	0-1 day	<8.0 mg/dL
	1-2 day	<12.0 mg/dL
	3-5 day	<16.0 mg/dL
	>5 days-60 years	0.3-1.2 mg/dL
	60-90 years	0.2-1.1 mg/dL
	>90 years	0.2-0.9 mg/dL

(通告463：原參考區間：0.3-1.2 mg/dL)

2. 檢驗項目Potassium，K 檢體採集注意事項，詳細內容如下：

檢驗項目：Potassium，K 鉀

健保編號：09022C

檢體採集：血清、血漿(Lithium Heparin) 0.3mL(或全血1.5mL)，請不要使用含Potassium Oxalate / Sodium Fluoride的採檢管採檢。病人必須空腹8~10小時(即抽血前一晚10點以後禁食)。血清或血漿檢體應避免溶血。保存方式：2 - 8°C保存7天，-20°C保存30天。

Urine：尿液0.3-2.0mL，保存於2 - 8°C或冷凍條件。若是檢測24時尿液的檢體，保存檢體的容器應該放置在冰箱或是在保存的過程中持續冰浴，不需添加任何保存劑。

參考區間：(mEq/L = mmol/L)

Blood：Serum 3.5-5.1/ Plasma 3.4-4.5 mEq/L

Urine：24 Hr：25.0-125.0 mEq/day，Random：未提供

K離子檢測，若為血漿(heparin)檢體必須額外註記，以免引用錯誤的參考區間。

謹此敬告週知修正

陳明輝



大安聯合醫事檢驗所
負責人陳明輝敬上